



# MANUAL *Erection System*<sup>®</sup>

## Hoe komt u in bezit van een MANUAL *Erection System*<sup>®</sup> (MES)

De meest eenvoudige en snelle manier is om uw order te plaatsen via de website [www.ereciempomp.nl](http://www.ereciempomp.nl). Maar u kunt het MES systeem ook bestellen bij een apotheek of telefonisch bij KESSEL Nederland.


## Andere oplossingen bij erectiestoornissen

KESSEL Nederland biedt u naast het **MANUAL *Erection System*<sup>®</sup>** met handpomp, tevens een systeem met elektrisch pompje, het **ACTIVE *Erection System*<sup>®</sup>**. Voor mannen die slechts kampen met een te kort durende erectie, is er een speciaal ringenset met de naam Ready Erection System. Meer informatie vindt op de internetsite [www.ereciempomp.nl](http://www.ereciempomp.nl)

## Meer willen weten

Indien u nog vragen heeft, raadpleeg dan uw huisarts of uroloog. Of schroom niet om uw vragen aan KESSEL Nederland voor te leggen. Dat kan telefonisch, per e-mail of per brief. U kunt rekenen op deskundig advies.

Voor meer informatie, raadpleegt u de website:  
[www.ereciempomp.nl](http://www.ereciempomp.nl)

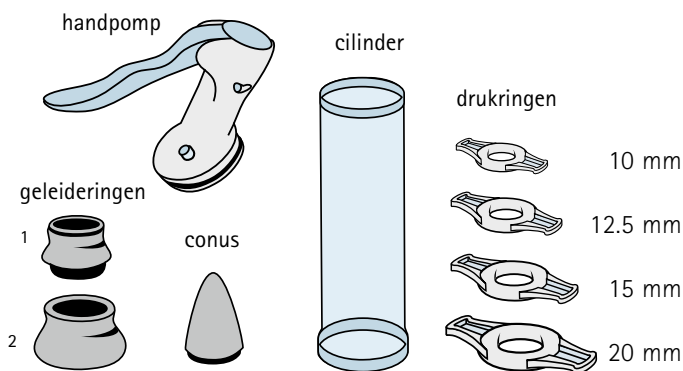

Het **MANUAL *Erection System*<sup>®</sup>** bestaat uit de volgende onderdelen:

- handbediend vacuümpompje
- cilinder van transparant perspex
- 2 geleideringen voor het plaatsen van de drukringen op de cilinder
- conus, hulpmiddel voor aanbrengen van de drukringen
- 4 drukringen met diameter van 10 12,5 15 en 20 mm
- flacon SYLK glijmiddel 50 ml, op waterbasis
- duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands
- DVD met instructievideo in Engels, Frans en Duits
- praktische opbergtas

Geproduceerd in Duitsland

Artikelnummer: MES 01  
Z-Index nummer: 15562573

Het **MANUAL *Erection System*<sup>®</sup>** is conform Europese richtlijnen gecertificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIa.

CE 0483

U heeft 2 jaar garantie op alle onderdelen, met uitzondering van de drukringen. Na de garantietermijn zijn de onderdelen altijd na te bestellen.



KESSEL Nederland  
Postbus 69 2501 CB DEN HAAG

Tel 070 364 32 82  
[www.medintim.nl](http://www.medintim.nl)  
[info@ereciempomp.nl](mailto:info@ereciempomp.nl)



MES 01 12112011 01



# MANUAL *Erection System*<sup>®</sup>

Effectief hulpmiddel  
bij erectiestoornissen

[www.ereciempomp.nl](http://www.ereciempomp.nl)

  
**MEDintim**  
personal healthcare



## MANUAL *Erection System*<sup>®</sup>

Effectief hulpmiddel  
bij erectiestoornissen

### Wat is het MANUAL *Erection System*<sup>®</sup> (MES)?

Het MES is een medisch hulpmiddel om een kunstmatige erectie op te wekken. Het bestaat uit een doorzichtige, plastic cilinder met een pompje dat met de hand bediend moet worden.

### Hoe werkt het MANUAL *Erection System*<sup>®</sup>?

De cilinder wordt over de slappe penis geplaatst. Vervolgens wordt lucht uit de cilinder gezogen. Door de onderdruk die daardoor ontstaat, stroomt bloed naar de penis. Zo vormt zich in enkele minuten een erectie, die voldoende is om weer normaal gemeenschap te kunnen hebben.



### Hoe wordt de erectie behouden?

Zodra de penis voldoende stijf is, wordt een speciale drukring aangebracht aan de basis van de penis. Deze ring voorkomt dat bloed wegstroomt uit de penis. Op deze wijze kan de erectie ongeveer 30 minuten in stand gehouden worden. De rest van het pompsysteem kan terzijde worden gelegd.

### Voor wie is het MANUAL *Erection System*<sup>®</sup> bestemd?

In principe biedt de MES erectiepomp een doeltreffende oplossing voor elke man met erectiestoornissen of impotentie, ongeacht de oorzaak van de klachten.

[www.erectiepomp.nl](http://www.erectiepomp.nl)